

Használati útmutató – Ujjra csíptethető pulzoximéter

◆ A készülék rendeltetése

A pulzoximéter a **véroxigénszint (SpO₂)** és a **pulzus (bpm)** gyors és egyszerű ellenőrzésére szolgál. Otthoni használatra készült, sportolók, idősek, kismamák vagy rendszeres egészségellenőrzést igénylő személyek számára.



A készülék részei

- ◆ Két színű, 0.96" OLED kijelző
- ◆ Rugalmas ujjcsipesz

- ◆ Bekapcsoló gomb
- ◆ Elemfoglalat (2× AAA – nem tartozék)
- ◆ Cserélhető csuklópánt rögzítési pont



Elem behelyezése

- ◆ Csúsztasd le az alsó elemtartó fedelét.
- ◆ Helyezz be **2 db AAA alkáli elemet** (polaritást jelölés szerint).
- ◆ Csukd vissza az elemtartót.

Fontos: az elemek nem tartozékok.



A pulzoximéter használata

- ◆ Tisztítsd meg és szárítsd meg az ujjat mérés előtt.
- ◆ Nyisd szét a csipeszt és helyezd be a kívánt ujjat (lehetőleg mutatóujj).
- ◆ Nyomd meg a bekapcsoló gombot.
- ◆ Tartsd a kezéd mozdulatlanul a mérés ideje alatt.
- ◆ A mérés 6–10 másodpercen belül megjelenik a kijelzőn.
- ◆ Az eredmény automatikusan frissül a mérés közben.
- ◆ Használat után a készülék néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsol.



Mit mutat a kijelző?

- ◆ **SpO₂ (%)**: véroxigén-szaturáció
- ◆ **PR (bpm)**: pulzusszám percenként
- ◆ **Pulzusgrafikon**: vizuális pulzuskijelzés
- ◆ **Forgatható kijelző**: 4 nézet – automatikus vagy gombnyomásra



⚙️ Műszaki adatok

Kijelző	0.96" OLED
SpO ₂ tartomány	70–100%
Pulzus tartomány	30–250 bpm
Pulse rate pontosság	±1 bpm
Áramfelvétel	<10mA normál használat
Tápellátás	2× AAA elem (nem tartozék)
Anyag	ABS + PC
Méret	57.5×37.1×35.2 mm



Csomag tartalma

- ♦ 1 × Ujjra csíptethető pulzoximéter
- ♦ 1 × Csuklópánt

⚠ Fontos tudnivalók

- ♦ A készülék nem orvosi diagnosztikai eszköz.
- ♦ Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot vagy kezelést.
- ♦ Ha eltérő vagy szokatlan értéket tapasztalsz, fordulj egészségügyi szakemberhez.
- ♦ Kerüld a használatát erős fényben, mozgás közben vagy hideg ujjal, mert pontatlan lehet.
- ♦ Ne ejtsd el, és ne érje víz.

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Megbízható minőség, gyors szállítás és gondosan válogatott egészségügyi kiegészítők.

Az Ön kényelméért – mindig, mindenhol.